



OBZOR
na dosah...

typ 02 týždenný dávkovač liekov

- veľkosť dávkovača: 136×81×25 mm (d×š×v)
- kazeta na lieky na celý týždeň
- k dispozícii v niekoľkých farebných prevedeniach
- každý deň je rozdelený na 3 časti RÁNO / OBED / VEČER
- každá časť týždňa sa otvára samostatne pomocou vysunutia šupátka

návod na použitie

Dávkovač držte vo vodorovnej polohe (popisky jednotlivých dní sú hore) a tiahom ruky vysuňte šupátko. Pri prvom otvorení je nutné použiť väčšiu silu, pri opakovanom otváraní už pôjde šupátko vysúvať ľahšie. Kazetu napľňte liekmi podľa predpisu alebo odporúčania a potom šupátko zasuňte späť do jeho zaklapnutia.



typ 03 týždenný dávkovač liekov

- veľkosť dávkovača: 200×100×25 mm (d×š×v)
- kazeta na lieky na celý týždeň
- každý deň je rozdelený na 3 farebne odlišené časti RÁNO / OBED / VEČER a môžete ho z kazety vybrať a používať samostatne ako denný dávkovač
- každá časť dňa sa otvára samostatne pomocou viečka

návod na použitie

Dávkovač držte vo vodorovnej polohe (popisky dní sú vľavo). Na denný zásobník zatlačte palcom zo strany od popiskov smerom doprava a vysuňte ho z kazety. Viečko zásobníka otvorte za výstupok smerom hore (výrobok je z vysoko odolného plastu z dôvodu dlhzej životnosti, preto môže byť prvé otváranie viečka tažšie). Zásobník napľňte liekmi, viečka zatvorite. Zásobník vsuňte do drážky na kazete a zasuňte späť do kazety.



typ 04 týždenný dávkovač liekov

- veľkosť dávkovača: 175×125×20 mm (d×š×v)
- kazeta na lieky na celý týždeň
- k dispozícii v niekoľkých farebných prevedeniach
- každý deň je rozdelený na 4 časti RÁNO / OBED / VEČER / NOC a môžete ho z kazety vybrať a používať samostatne ako denný dávkovač
- každá časť dňa sa otvára samostatne pomocou viečka

návod na použitie

Dávkovač držte tak, aby popisky jednotlivých dní boli na ľavej strane. Na spodnej strane kazety je u každého dňa otvor. Týmto otvorom zatlačte prstom na denný zásobník a vyberte ho z kazety. Viečko zásobníka otvorte za výstupok smerom hore. Zásobník napľňte liekmi, viečka zatvorite a potom ho zatlačte späť do kazety, až do jeho zaklapnutia. Postup opakujte pre každý ďalší deň.



typ 09 týždenný dávkovač liekov

- veľkosť dávkovača: 175×125×20 mm (d×š×v)
- kazeta na lieky na celý týždeň
- k dispozícii v niekoľkých farebných prevedeniach
- každý deň je rozdelený na 4 časti RÁNO / OBED / VEČER / NOC a môžete ho z kazety vybrať a používať samostatne ako denný dávkovač
- každá časť dňa sa otvára samostatne pomocou viečka

návod na použitie

Dávkovač držte tak, aby popisky jednotlivých dní boli na ľavej strane. Na spodnej strane kazety je u každého dňa otvor. Týmto otvorom zatlačte prstom na denný zásobník a vyberte ho z kazety. Viečko zásobníka otvorte za výstupok smerom hore. Zásobník napľňte liekmi, viečka zatvorite a potom ho zatlačte späť do kazety, až do jeho zaklapnutia. Postup opakujte pre každý ďalší deň.



Vyrobené zo zdravotne nezávadného materiálu a schválené Štátnym zdravotným ústavom v Prahe. V prípade likvidácie postupujte prosím v súlade so zákonom o odpadoch.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie, ani na škody spôsobené nesprávnym používaním výrobku.



typ 07 týždenný dávkovač liekov

- veľkosť dávkovača: 140x30x20 mm (d×š×v)
- dávkovač liekov na celý týždeň
- k dispozícii v niekoľkých farebných prevedeniach
- týždeň je rozdelený pomocou skratiek dní do 7 časti
- každá časť dňa sa otvára samostatne pomocou viečka, zatiaľ čo ostatné časti zostávajú dôkladne zatvorené
- možnosť jednofarebnej potlače (napr. firemným logom)
- vhodné pre reklamné účely ako pre jednotlivcov, tak i pre zdravotnické a socialné zariadenia, firmy alebo reklamné agentúry

návod na použitie

Dávkovač držte jednou rukou a prstami druhej ruky zatlačte na výstupok na viečku smerom hore. Prvé otváranie viečka môže byť ľahšie. Dávkovač naplňte liekmi a viečko zatvorte.



typ 03 denný dávkovač liekov

- veľkosť dávkovača: 95x24x25 mm (d×š×v)
- dávkovač na lieky na 1 deň, ktorý je rozdelený na 3 farebne odlišené časti RÁNO / OBED / VEČER
- každá časť dňa sa otvára samostatne pomocou viečka, zatiaľ čo ostatné časti zostávajú dôkladne uzavreté

návod na použitie

Dávkovač chytte do rúk. Viečko zásobníka otvorte za výstupok smerom hore. Výrobok je z vysoko odolného plastu z dôvodu dlhšej životnosti, preto môže byť prvé otváranie viečka ľahšie. Pri ďalšom otvorení už bude manipulácia ľahšia. Dávkovač naplňte liekmi a viečko zatvorte.



typ 04 denný dávkovač liekov

- veľkosť dávkovača: 110x22x20 mm (d×š×v)
- dávkovač na lieky na 1 deň dostupný v niekoľkých farebných prevedeniach
- deň je rozdelený pomocou symbolov na 4 časti RÁNO / OBED / VEČER / NOC
- každá časť dňa sa otvára samostatne pomocou viečka, zatiaľ čo ostatné časti zostávajú dôkladne zatvorené
- vhodné pre reklamné účely s možnosťou jednofarebnej potlače (napr. firemným logom)
- praktické viacúčelové použitie

návod na použitie

Dávkovač chytte do rúk. Viečko zásobníka otvorte za výstupok smerom hore. Dávkovač naplňte liekmi a viečko zatvorte.



typ 05 kapesný dávkovač lieků

- veľkosť dávkovača: ø 50 mm, výška 15 mm
- cestovná forma dávkovača na lieky vhodná ako prívesok na klúče
- k dispozícii v niekoľkých farebných kombináciach
- dávkovač je rozdelený na 2 časti
- možnosť jednofarebnej potlače (napr. firemným logom)
- vhodné pre reklamné účely ako pre jednotlivcov, tak pre zdravotnické a socialné zariadenia, firmy alebo reklamné agentúry
- praktické viacúčelové použitie

návod na použitie

Dávkovač držte prstami oboch rúk a pootočte proti sebe viečko a dno. Vložte lieky a dávkovač otočením zatvorte.



viacúčelová dentálna dóza

- veľkosť dózy: ø 98 mm, výška 72 mm
- viacúčelová dentálna dóza určená na odkladanie a čistenie zubných protéz a detských zubných strojčekov
- dostupná v niekoľkých farebných kombináciach
- skladá sa z 3 častí – misky, ponorného sítka a viečka
- využiteľná v širokej šíkale ďalších odborov ako je zdravotníctvo, laboratória, kozmetika, kuchyne atď.

návod na použitie

Zubnú protézu (zubný strojček) očistíme kefkou, opláchneme a vložíme do dózy. Pri použití čistiacich tabliet vložíme výrobcom odporúčaný počet tabliet na dno dózy. Zubnú protézu (strojček), umiestnenú v ponornom sítku, vsunieme do dózy a zalejeme teplou vodou, až je úplne ponorená. Priklopíme viečkom a necháme pôsobiť. Pred použitím protézu (strojček) prepláchneme pod tečúcou vodou.



výrobky pre reklamné účely

- kvalitné české výrobky pre všetky vekové kategórie
- originálny moderný dizajn
- vhodné ako pre jednotlivcov, tak i pre zdravotnické a socialné zariadenia, firmy alebo reklamné agentúry, fitness a organizátorov výstav, veľtrgov a seminárov
- možnosť jednofarebnej potlače (napr. logom Vašej spoločnosti)
- bez potlače možnosť odberu aj v malých množstvách
- krátká dodacia lehota
- praktické viacúčelové použitie

